



# ゆりりん Yuririn

USH-052

## 長時間尿動態データレコーダ

医療機器承認番号：21600BZZ00466000

非侵襲で尿量を測定




画面でお知らせ



音でお知らせ

振動でお知らせ

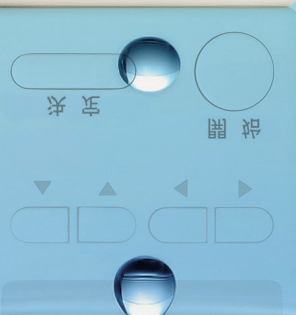

TAKESHIBA

株式会社 タケシバ電機

〒252-0237 神奈川県相模原市中央区千代田4-12-6 Tel. 042 776 0655 Fax. 042 776 0656


# 尿量を継続的に測定 設定値になるとアラームと振動で お知らせします。

## 「ゆりりん USH-052」とは・・・

「ゆりりん USH-052」は超音波で膀胱内の尿量を測定する装置です。

これまでも膀胱内の尿量を測定する装置はありましたが、長時間にわたり継続的に測定するものとしては「ゆりりん USH-052」がはじめて。

## 測定方法

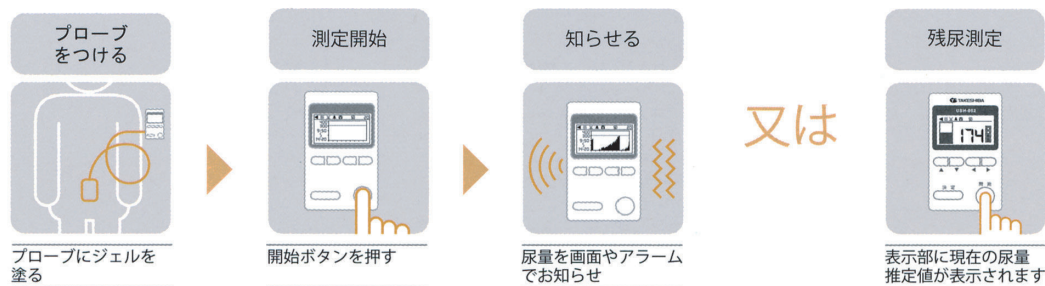

## 「ゆりりん USH-052」には目的に応じた2つの機能があります。

### 残尿測定


保険診療報酬区分 D216-2 残尿測定検査 55点

- 1 現在の膀胱内の尿量を測定します。
- 2 残尿量（蓄尿量）が表示されます。

- OAB 診断の目安に
- バイオフィードバック
- 導尿カテーテルのタイミングの目安に


### 残尿がない場合

「0」と表示部に表示します。

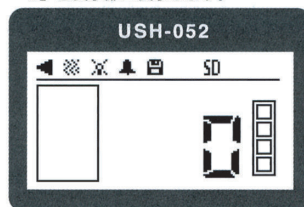

### 残尿がある場合


測定された値を表示部に表示します。

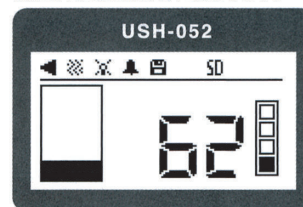

※残尿測定は安静にして、仰向けに寝た状態で行ってください。

## 定時測定

- 1 膀胱内の尿量を自動的に一定の間隔で継続的に測定します。
- 2 膀胱内の尿量が徐々に増えていく様子をグラフで表示します。
- 3 予め設定した尿量に達すると、アラームと振動でお知らせします。

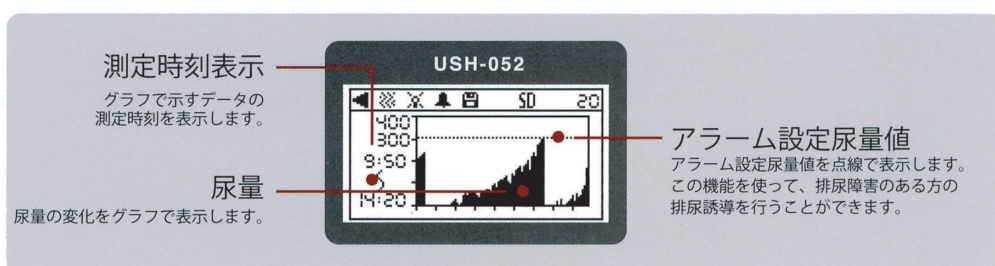

- 導尿カテーテルのタイミングの目安に
- 膀胱機能評価として

## オプションの mini-SD カードを使って、データを保存しパソコン上で解析することができます。

### 測定データ



### データ管理

パソコン上でデータを見ることが出来るため、医師が患者さんの排尿パターンを解析するのに便利です。今まで手作業だった排尿パターンの解析、失禁の量や頻度の調査を自動的に記録することができます。

尿量値の推移  
測定日時

仰臥位安静時

## 仕様

- 測定方式：A モード超音波 / ●超音波周波数：3MHz / ●測定範囲：0～999ml / ●測定精度：±(15%+20ml) / ●表示器：LCD / ●アラーム：LED、ブザー及び振動
- データ記録：mini-SD(別売) / ●電源：単3乾電池(2個) / ●寸法(測定器本体)：110x66x32(mm) / プローブ：45x33x7.6(mm) / ●重量(測定器本体)：200g / プローブ：25g
- 構成：測定器本体、プローブ

## 注意

膀胱に奇形のある方、子宮筋腫のある方、妊娠している方などは「ゆりりん USH-052」が膀胱を正確に捉えることができません。「ゆりりん USH-052」はあくまでも膀胱内の尿量を測る装置ですので、測定した値についての判断は専門の医師にご相談ください。

詳しくは下記へお問い合わせください。

ホームページ：<http://www.yuririn.jp>

サポートセンター：☎ 0120-33-0405

メール：[support@yuririn.jp](mailto:support@yuririn.jp)